

追加订货信息

组件编号	说明	面罩颜色
100332	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	米色
100336	只有SleepWeaver高级鼻面罩	米色
100274	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	蓝色
100289	只有SleepWeaver高级鼻面罩	蓝色
100277	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	粉色
100291	只有SleepWeaver高级鼻面罩	粉色
100281	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	迷彩
100293	只有SleepWeaver高级鼻面罩	迷彩
100285	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	豹纹
100295	只有SleepWeaver高级鼻面罩	豹纹
100239	SleepWeaver高级鼻面罩和头套	黑色

SleepWeaver包括的组件

面罩和旋转接头



旋转接头

一件头套



SleepWeaver® ADVANCE

简体中文

软布CPAP鼻面罩和头套

不含乳胶



面罩简介

SleepWeaver高级面罩与头套相连 (如左图所示)。头套有三个调节点，面罩每侧各一个，头箍带上有一个。旋转接头与CPAP或双水平机器的软管相连。

预期用途

SleepWeaver设计供个人和多名患者重复使用，作为经处方配置的在家中和睡眠实验室使用的不间断气道正压或双水平治疗。SleepWeaver已经在CPAP和双水平系统上使用从4 cm H2O至最高20cm H2O的压力进行测试。请于www.circadiance.com/help观看“指导视讯”

佩戴面罩

1. 拆开SleepWeaver高级面罩的包装。
2. 将CPAP或双水平机器的导管连接到旋转接头 接头朝着面罩的正面。
3. 开启CPAP或双水平机器，调至处方压力。
4. 面罩充气时，双手拿着头套，将面罩固定在鼻子上，然后将头套拉过头部。确保面罩杯位于鼻子的中间，头箍带与头部的中间对齐。
5. 将头套拉过头部后面，以令颈带刚好贴在耳后。
6. 如果出现漏气，请参阅“调整漏气”部份。
7. 以平常的睡姿躺下。如果出现漏气，请重新调整面罩。
8. 我们的网站提供面罩佩戴说明的视讯，网址：www.circadiance.com/help

调整漏气 - 如果出现漏气，请尝试以下步骤：

1. 开启CPAP或双水平机器并调至处方要求压力，捏起面罩部份直接盖在鼻子上，稍微将面罩从脸部向脚部方向拉开，然后轻轻松手。
2. 如果面罩两侧漏气，通过松开箍带上的调整片，然后拉出箍带以系紧面罩来调整颈带，再将调整片与箍带扣紧。
3. 如果漏气至眼睛，调整头箍带。
4. 稍微松开面罩，然后重复步骤1，有时可以防止漏气并佩戴得更贴合。
5. 如果头箍带过紧或过松，也可能出现漏气。多多练习，您应该找到既紧贴而又舒适的位置。



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Tel. +31 (0)70 345 8570



0459



1300 Rodi Road • Turtle Creek, PA 15145
Tel. 888 • 825 • 9640 or +1 724 • 858 • 2837
info@circadiance.com
www.circadiance.com

墨西哥组装
组件为美国制造。

取下面罩

1. 如要取下SleepWeaver，将面罩从鼻子上拉起，然后将头套从头部提起。
2. 您无需松开头套箍带。多多练习，您将能够在调至适合自己的位置后将其带上和取下。

家用清洁说明 - 个人使用

- 使用温和的软质肥皂手洗面罩进行清洁。
- 您也可以将洗衣机加入温和的衣物清洁剂清洗SleepWeaver。(按清洁剂说明) 在冷水或温水中清洗，切勿使用热水。
- 挂起晾干。(根据湿度，干燥时间大约6至12小时)
- 请勿将SleepWeaver面罩放入干衣机内烘干。
- 使用一段时间之后，接合旋转接头和面罩的医用胶带会失去粘性，需要更换。
- 使用不含乳胶的白色医用胶带接合旋转接头和面罩。您可以取下旋转接头，并将其浸泡在1份白醋兑3份清水 (1/3杯白醋兑1杯清水) 的溶液中单独清洁。
- 浸泡后彻底冲洗旋转接头，然后让它干燥。
- 用不含乳胶的医用胶带重新接合旋转接头。(请参阅“旋转接头”部份)

多人使用清洁说明 - 睡眠实验室

- 面罩应在患者使用后，用高浓度化学消毒剂 (如Control III®) 进行消毒。(必须根据消毒剂制造商的指示进行消毒)
- 消毒后，面罩必须加入温和的衣物清洁剂机洗。(按清洁剂指示) 在冷水或温水中清洗，切勿使用热水。挂起晾干，请勿将SleepWeaver放入干衣机内烘干。(根据湿度，干燥时间大约6至12小时)
- 每名患者使用后，请取下、清洁和更换旋转接头。(请参阅“旋转接头”部份)



- 面罩不得使用2%戊二醛溶液、加热灭菌、热水巴氏杀菌、高压灭菌或环氧乙烷气体灭菌进行消毒。请勿使用含有三氯乙烯的漂白剂或溶剂。

取下旋转接头 - 不必在每次清洗面罩时取下旋转接头和更换胶带，除非您患有慢性疾病且您的医师或专科护理师建议您这么做，或者面罩是用于睡眠实验室的情况下。

1. 将面罩的里面翻到外面，露出接合旋转接头和面罩的白色医用胶带，然后取下旧的胶带。
2. 将旋转接头从鼻孔中推至面罩外进行清洁。
3. 按照上述清洁说明清洁面罩。
4. 将旋转接头浸泡在1份白醋兑3份清水的溶液中单独清洁。浸泡后彻底冲洗，然后让它干燥。

重新接合旋转接头 - 使用不含乳胶的防水白色医用胶带

1. 旋转接头和面罩都完全干燥后，再次将面罩的里面翻到外面。
2. 将旋转接头插入面罩，“插入组件” (底部) 延伸至离织物1/2英吋处。
3. 剪下一条不含乳胶的白色医用胶带，长度大约10 1/2英吋
4. 首先将胶带绕在底部附近，同时用一只手按住面罩里的旋转接头。确保胶带位于织物和旋转接头的中间。
5. 将胶带缠绕旋转接头和面罩至少3次。
6. 如必要，剪掉多余的胶带，然后用手指抚平任何褶皱。

说明也提供线上版本，请见www.circadiance.com/help



医疗信息

SleepWeaver不含乳胶物质。如果您对此面罩或头套的任何 组件出现任何反应，请停止使用并谘询您的医师或专科护理师。

呼气阀

呼气不会喷出气体。排气是通过一连串的小针孔进行的。经过呼气阀的流量以及旋转接头泄漏的气体和其他资源如下：

压强 (cmH2O)	4	5	10	15	20
流量 (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0



警示和警告

- 在美国，联邦法律规定，此器械仅限医师销售或遵医嘱销售。
- 此系统仅应与您的医师或呼吸治疗人员建议的CPAP或双水平系统搭配使用。
- 在确定CPAP或双水平系统已经开启并正常工作之前，不应使用此面罩。
- 切勿堵塞排气孔。
- 使用本产品时，请避免吸烟
- 面罩不得使用2%戊二醛、加热灭菌、热水巴氏杀菌、高压灭菌或环氧乙烷气体灭菌进行消毒。请勿使用含有三氯乙烯的漂白剂或溶剂。

有限保固

www.circadiance.com/help