

## Προφυλάξεις

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συσκευής θεραπείας για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές της μάσκας παρέχονται στον κλινικό γιατρό σας για να βεβαιωθεί ότι είναι συμβατές με τη συσκευή θεραπείας. Εάν χρησιμοποιηθεί εκτός των προδιαγραφών, η σφράγιση και η άνεση της μάσκας μπορεί να μην είναι αποτελεσματική, μπορεί να μην επιτευχθεί η βέλτιστη θεραπεία, και η διαρροή ή ο ρυθμός διαρροής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
- Η μάσκα πρέπει να καθαρίζεται κάθε δεύτερη μέρα για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης και ρύπανσης από το δέρμα στη μάσκα.
- Η μάσκα δεν πρέπει να καθαρίζεται με μη εγκεκριμένες μεθόδους καθαρισμού ή απολύμανσης.
- Ο χρήστης πρέπει να καθαρίσει το πρόσωπό του πριν φορέσει τη μάσκα.
- Ο ασθενής δεν πρέπει να αλλάξει τη σχεδίαση της μάσκας.
- Μην τοποθετείτε τη μάσκα σε στεγνώτήριο ρούχων.

## Αντενδείξεις

- Καμία

## Τεχνικές προδιαγραφές

1. Εύρος θεραπείας πίεσης: 4 έως 20 cmH<sub>2</sub>O
2. σύνδεση στροφέα 22mm
3. Αντίσταση (πτώση πίεσης)  
@ 50 lpm = 0.6 cmH<sub>2</sub>O  
@ 100 lpm = 0.9 cmH<sub>2</sub>O
4. Σταθερή τιμή διαρροής (η τιμή μπορεί να διαφέρει λόγω κατασκευαστικών παραλλαγών):

Πίεση (cmH <sub>2</sub> O)	4	5	10	15	20
Ροή (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0

5. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης και οι συνθήκες λειτουργίας δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
6. Επίπεδο ήχου
  - A-σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής ισχύος, 26 dBA
  - A-σταθμισμένο επίπεδο πίεσης ήχου @ 1m, 18 dBA
7. Κανονικά αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και καθαρισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
8. Η συσκευή δεν είναι κατασκευασμένη από φυσικό ελαστικό λάτεξ.

**Περιορισμένη εγγύηση** [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague,  
The Netherlands



0459

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Circadiance επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.circadiance.com/IP](http://www.circadiance.com/IP)

100394 REV 5



**SleepWeaver**  
Soft Cloth Masks

## Advance

Οδηγίες χρήσης


ελληνικά

### Προοριζόμενη χρήση

Αυτή η μάσκα SleepWeaver προορίζεται για την παροχή μιας διεπαφής για συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP) ή θεραπεία δύο επιπέδων. Αυτή η μάσκα προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση από ένα μόνο ασθενή στο σπίτι και για πολλαπλές χρήσεις από πολλαπλούς ασθενείς σε νοσοκομείο/ίδρυμα. Αυτή η μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς πάνω από 66 λίβρες (30 κιλά).



## Προσαρμογή της μάσκας

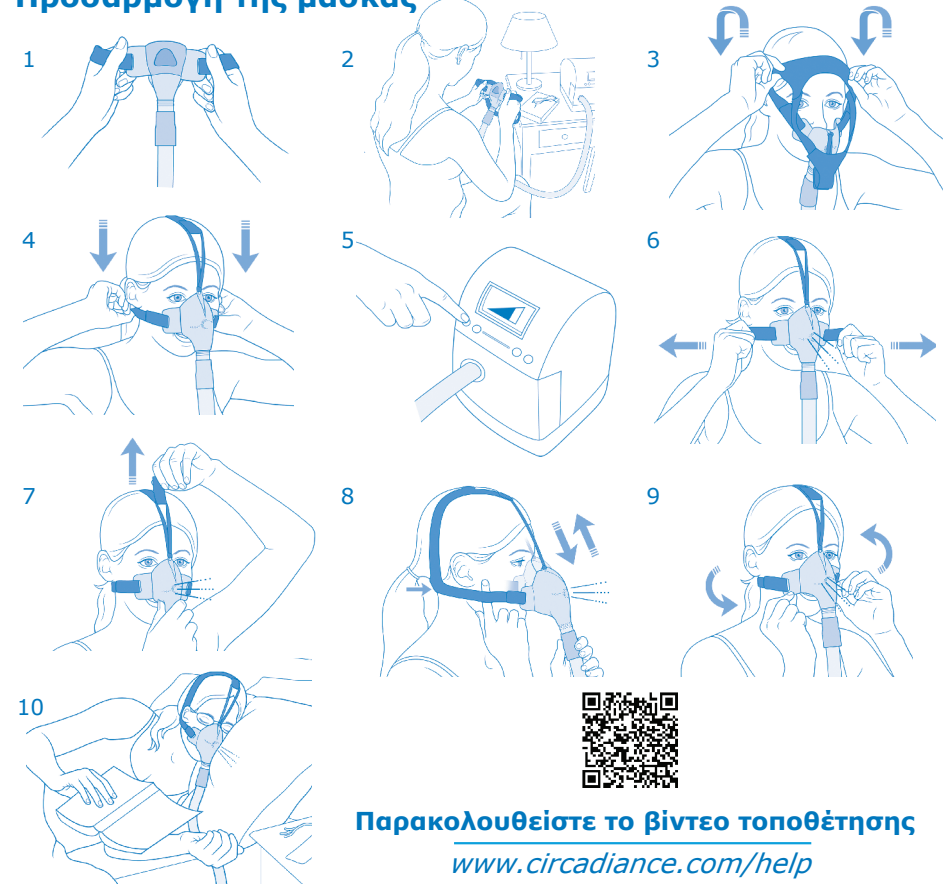

**Παρακολουθείστε το βίντεο τοποθέτησης**

[www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)



Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 17480, Pittsburgh PA 15235  
Φυσική διεύθυνση: 1300 Rodi Road Turtle Creek PA 15145  
Τηλέφωνο: 888-825-9640 or +1 724-858-2837  
cservice@circadiance.com [www.sleepweaver.com](http://www.sleepweaver.com)

## Τοποθέτηση της μάσκας, συνέχεια

1. Αφαιρέστε τη μάσκα από τη συσκευασία. Εάν έχετε αφαιρέσει τη μάσκα από το εξάρτημα κεφαλής, επανασυνδέστε τους ιμάντες του εξαρτήματος κεφαλής μέσα από τις σχισμές στα πτερύγια της μάσκας (εικόνα 1). Συνδέστε τη σωλήνωση από το μηχανήμα στο σύνδεσμο πλαστικού σωλήνα στο μπροστινό μέρος της μάσκας.
2. Τοποθετήστε τη μάσκα περνώντας το εξάρτημα κεφαλής πάνω από το κεφάλι σας, έτσι ώστε το κύπελλο της μάσκας να είναι κεντραρισμένο πάνω από τη μύτη και ο ιμάντας κεφαλής να είναι στο κέντρο του προσώπου σας (εικόνας 2 & 3).
3. Τραβήξτε το εξάρτημα της κεφαλής πάνω από το πίσω μέρος του κεφαλιού σας μέχρι το λουρί λαιμού να βρίσκεται κάτω από τα αυτιά σας (εικόνα 4).
4. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα (εικόνα 5).
5. Ρυθμίστε πρώτα τους ιμάντες λαιμού, έτσι ώστε το κάτω μέρος της μάσκας να στηρίζεται άνετα στο άνω χείλος σας, ακριβώς κάτω από τα ρουθούνια σας (εικόνα 6).
6. Ρυθμίστε τον ιμάντα της κεφαλής και τραβήξτε τη μάσκα ώστε να στηρίζεται άνετα στη μύτη σας (εικόνα 7).
7. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κεφαλής δεν είναι υπερβολικά σφιχτό. Θα πρέπει να είναι εύκολο να τοποθετήσετε ένα δάκτυλο κάτω από κάθε ιμάντα του εξαρτήματος κεφαλής (εικόνα 8).
8. Ξαπλώστε στην κανονική σας θέση ύπνου και, αν χρειάζεται, μετακινήστε τη μάσκα έτσι ώστε το ύφασμα να εφάπτεται πάνω στο δέρμα σας (εικόνας 9 & 10). Μπορείτε να βρείτε επιπλέον συμβουλές ρύθμισης στην παρακάτω ενότητα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για την τοποθέτηση στη διεύθυνση [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help).

## Ρύθμιση για διαρροές - Εάν προκύψουν διαρροές, προβείτε στα εξής:

1. Με το μηχανήμα σας CPAP ή δύο επιπέδων ενεργοποιημένο στη συνταγογραφούμενη πίεσή σας, τσιμπήστε το τμήμα της μάσκας που βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη μύτη σας, τραβήξτε τη μάσκα λίγο μακριά από το πρόσωπό σας, προς τα πόδια σας, και αφήστε την απαλά.
2. Εάν προκύψουν διαρροές από τις πλευρές της μάσκας, ρυθμίστε τις λωρίδες λαιμού απαγκιστρώνοντας τη γλωπτιδα από τη λωρίδα και τραβώντας τις λωρίδες προς τα έξω για να σφίξετε τη μάσκα, και κατόπιν επανασυνδέστε τη γλωπτιδα στη λωρίδα.
3. Εάν προκύψουν διαρροές στα μάτια σας, ρυθμίστε τη λωρίδα κεφαλής.
4. Μερικές φορές μπορείτε να σταματήσετε τις διαρροές και να προσαρμόσετε καλύτερα τη μάσκα χαλαρώνοντάς την λίγο, και επαναλαμβάνετε το Βήμα 1.
5. Οι διαρροές ενδέχεται να προκύψουν επίσης εάν οι λωρίδες του καλύμματος κεφαλής είναι πολύ σφιχτές ή πολύ χαλαρές. Με την επαναλαμβανόμενη χρήση, θα βρείτε την καλή προσαρμογή που είναι άνετη για εσάς.

## Οδηγίες καθαρισμού στο σπίτι - Ατομική χρήση

1. Πλένετε με το χέρι τη μάσκα κάθε δεύτερη μέρα με ένα ήπιο, μη διαβρωτικό σαπούνι σε ζεστό νερό. Αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως
2. Πλένετε το εξάρτημα κεφαλής στο χέρι μια φορά κάθε εβδομάδα.
3. Αφού τη φορέσετε πολλές φορές, το αυτοκόλλητο της ιατρικής ταινίας που συνδέει τοστροφέα στη μάσκα θα χάσει τη συγκόλλησή του και θα πρέπει να αντικατασταθεί.
4. Ο στροφέας συνδέεται με τη μάσκα χρησιμοποιώντας άσπρη ιατρική ταινία χωρίς λατέξ. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το στροφέα και να τον καθαρίσετε ξεχωριστά, βουτώντας τον σε διάλυμα από 1 μέρος ξύδι και 3 μέρη νερού (1/3 φλυτζανιού ξύδι σε 1 φλυτζάνι νερό).
5. Ξεπλένετε καλά το στροφέα αφότου τον έχετε βυθίσει στο διάλυμα και μετά τον αφήνετε να στεγνώσει.
6. Επανασυνδέστε το στροφέα με την ιατρική ταινία που δεν έχει λατέξ. (αναφερθείτε στις ενότητες του στροφέα)

## Καθαρισμός και απολύμανση μεταξύ ασθενών

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help) για οδηγίες.

## Αφαίρεση της μάσκας


1. Για να αφαιρέσετε τη SleepWeaver, τραβήξτε τη μάσκα μακριά από τη μύτη σας και σηκώστε το κάλυμμα κεφαλής από το κεφάλι σας.
2. Δε χρειάζεται να χαλαρώσετε τις λωρίδες στο κάλυμμα κεφαλής. Με την επαναλαμβανόμενη χρήση θα μπορείτε να το φορέσετε και να το τραβήξετε αφότου το προσαρμόσετε όπως είναι άνετο για εσάς.

**Αφαίρεση του στροφέα** - Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το στροφέα και να αντικαταστήσετε την ταινία κάθε φορά που πλένετε τη μάσκα, παρά μόνον εάν πάσχετε από κάποια χρόνια πάθηση και ο ιατρός σας ή ο θεραπευτής αναπνευστικού σας εχουν συμβουλευθεί να το κάνουν αυτό ή εάν η μάσκα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Εργαστηρίου Ύπνου.

1. Γυρίστε τη μάσκα μέσα έξω για να εκτεθεί η άσπρη ιατρική ταινία που συνδέει το στροφέα με τη μάσκα και βγάλτε την παλιά ταινία.
2. Σπρώξτε το στροφέα μέσα από τη ρινική οπή και έξω από τη μάσκα για καθαρίσμο.
3. Καθαρίστε τη μάσκα τηρώντας τις οδηγίες καθαρισμού που δίνονται ανωτέρω.
4. Καθαρίστε το στροφέα ξεχωριστά, βουτώντας τον σε ένα διάλυμα από 1 μέρος ξύδι και 3 μέρη νερού. Τον ξεπλένετε αφότου τον έχετε βυθίσει στο διάλυμα και μετά τον αφήνετε να στεγνώσει.

**Επανασύνδεση του στροφέα** - Χρησιμοποιήστε υδατοστεγή, ιατρική ταινία χωρίς λατέξ.

1. Αφού στεγνώσουν πλήρως και ο στροφέας και η μάσκα, γυρίστε πάλι τη μάσκα μέσα έξω.
2. Τοποθετήστε το στροφέα μέσα στη μάσκα με την «αρσενική» (πτυχωτή) πλευρά να εξέχει περίπου 1,25 εκ. από το ύφασμα.
3. Κόψτε ένα κομμάτι από την ιατρική ταινία χωρίς λατέξ σε μήκος περίπου 27 εκ.
4. Κρατήστε το στροφέα στη μάσκα με το ένα χέρι ενώ ξεκινάτε την ταινία δίπλα από την πτυχή. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία σας είναι επάνω από το ύφασμα κατά το 1/2 και επάνω από το στροφέα κατά το 1/2.
5. Τυλίξτε την ταινία γύρω από το στροφέα και τη μάσκα 3 φορές.
6. Κόψτε τυχόν περίσσια ταινία, εάν χρειάζεται, και εξομαλύνετε το με το δάκτυλο για να φύγουν οι πτυχές.
7. Οι οδηγίες διατίθενται επίσης στη διεύθυνση [www.circadiance.com/help](http://www.circadiance.com/help)

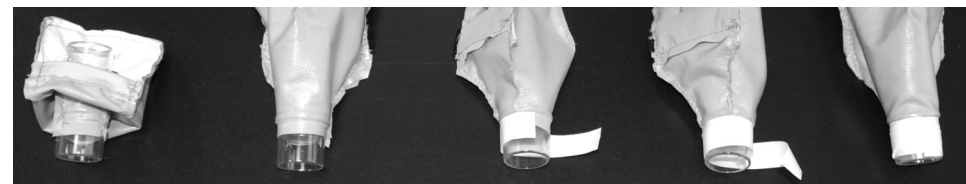

## ⚠️ Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή είναι αερίζουσα μάσκα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κύκλωμα εξαερισμού διπλών άκρων.
- Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε αντιδράσεις σε οποιοδήποτε μέρος της μάσκας ή του εξαρτήματος κεφαλής, διακόψτε τη χρήση αμέσως.
- Αυτό το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν η συσκευή θεραπείας είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά.
- Οι οπές αερισμού δεν πρέπει ποτέ να φράζονται.
- Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα και το εξάρτημα κεφαλής έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών.
- Εάν υπάρχει ορατή φθορά ενός εξαρτήματος του συστήματος (ρωγμές, σπασμένα μέρη, σχισίματα, κ.λ.π.) ή εάν μετά τον καθαρισμό κάποια εξαρτήματα δεν έχουν καθαρίσει, το συγκεκριμένο εξάρτημα θα πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί.
- Εάν αλλάξετε τη συχνότητα, ή χρησιμοποιήσετε μέθοδο ή καθαριστικό για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στη μάσκα και κατά συνέπεια στην ασφάλεια ή στην ποιότητα της θεραπείας.
- Εάν η μάσκα χρησιμοποιείται με συμπληρωματικό οξυγόνο, η ροή οξυγόνου θα πρέπει να απενεργοποιηθεί εάν το μηχανήμα δεν λειτουργεί, επειδή το συσσωρευμένο οξυγόνο ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν η μάσκα χρησιμοποιείται με συμπληρωματικό οξυγόνο, ο ασθενής πρέπει να απέχει από το κάπνισμα.